



PRZEWODNIK

WYGRYWANIE PROFILI NOWYCH MATERIAŁÓW
NA DRUKARKI ASIGA MAX, MAX2, ULTRA.



Cześć!

Cieszymy się, że korzystasz z tego przewodnika! Mamy nadzieję, że cały proces przebiegnie bez problemów. Jeśli jednak napotkasz jakiegokolwiek trudności skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy!



info@syntegre.com




+48 888 318 314

Sposób postępowania jest taki sam dla każdego materiału. **Zwróć uwagę na kolor żywicy**, którego będziesz używał/a. Ze względu na specyfikę pracy drukarek ASIGA profile **nie mogą być stosować zamiennie**.

Bez względu na używaną wersję programu Composer, proces dodawania nowych profili jest identyczny. Jedyna różnica została pokazana w kroku 7.

Znajdź odpowiedni plik **.ini** dla używanego materiału na naszej stronie internetowej www.syntegre.com w zakładce:

Produkty > Kompatybilne drukarki > ASIGA MAX

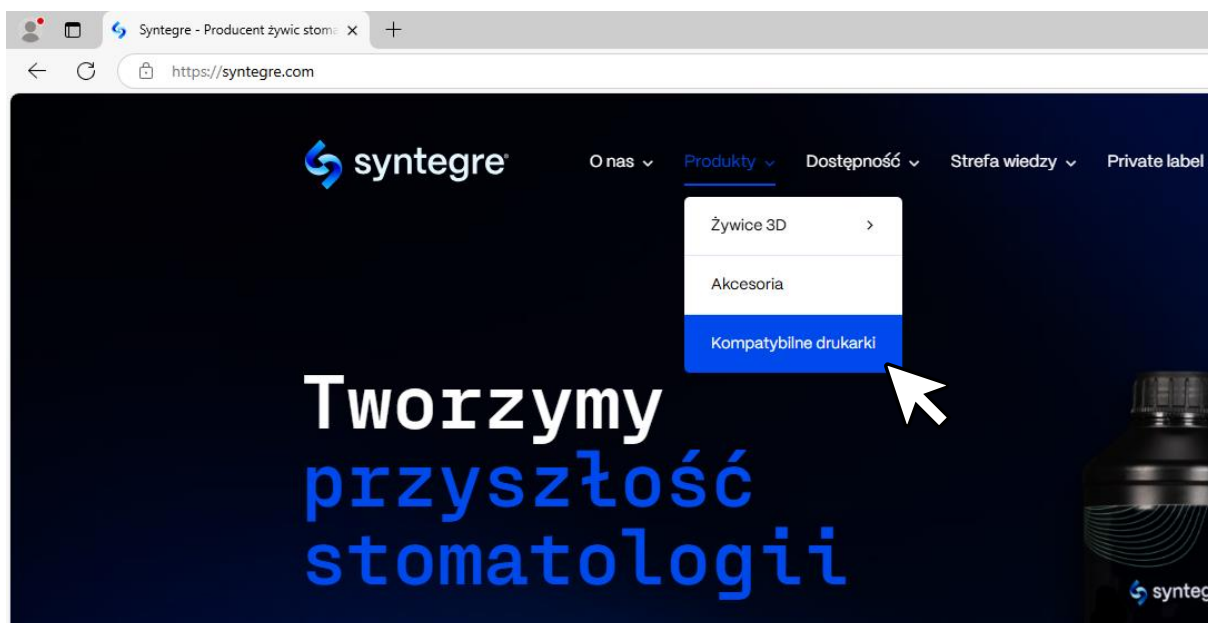


Powodzenia!


Uruchom program ASIGA Composer i upewnij się, że masz połączenie z drukarką (jeśli korzystasz z sieci WiFi, sprawdź IP drukarki).

Dodanie nowego profilu materiału


1. Utwórz nowe zadanie

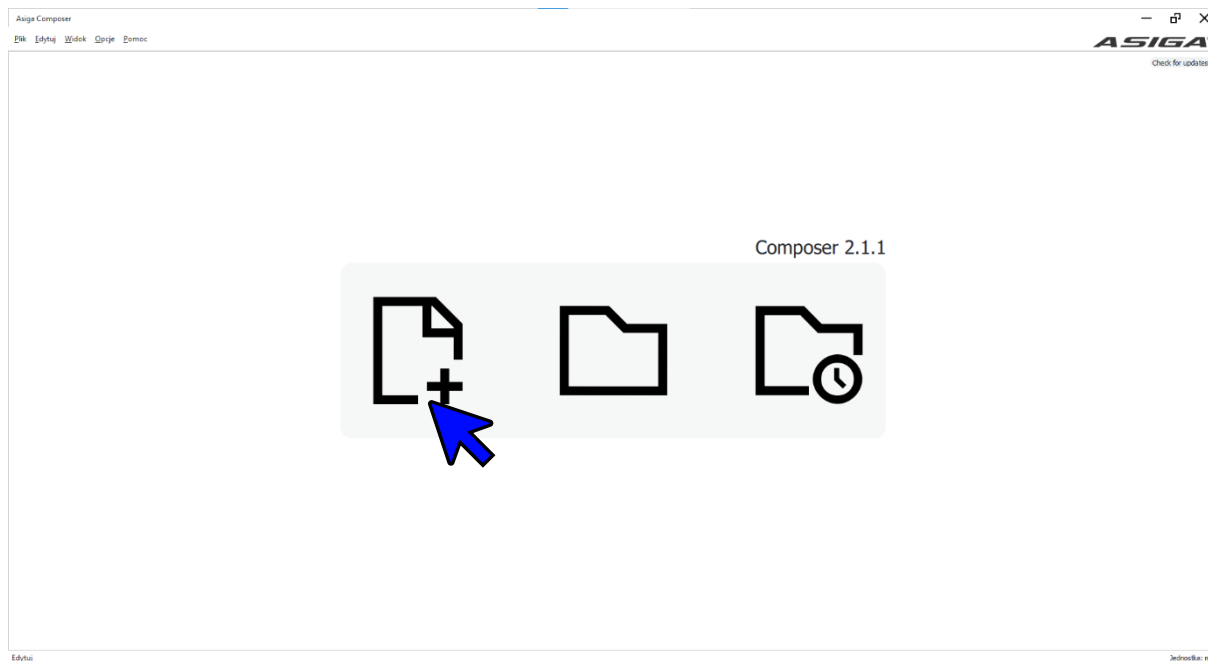


2. Wybierz Material Profile Settings.

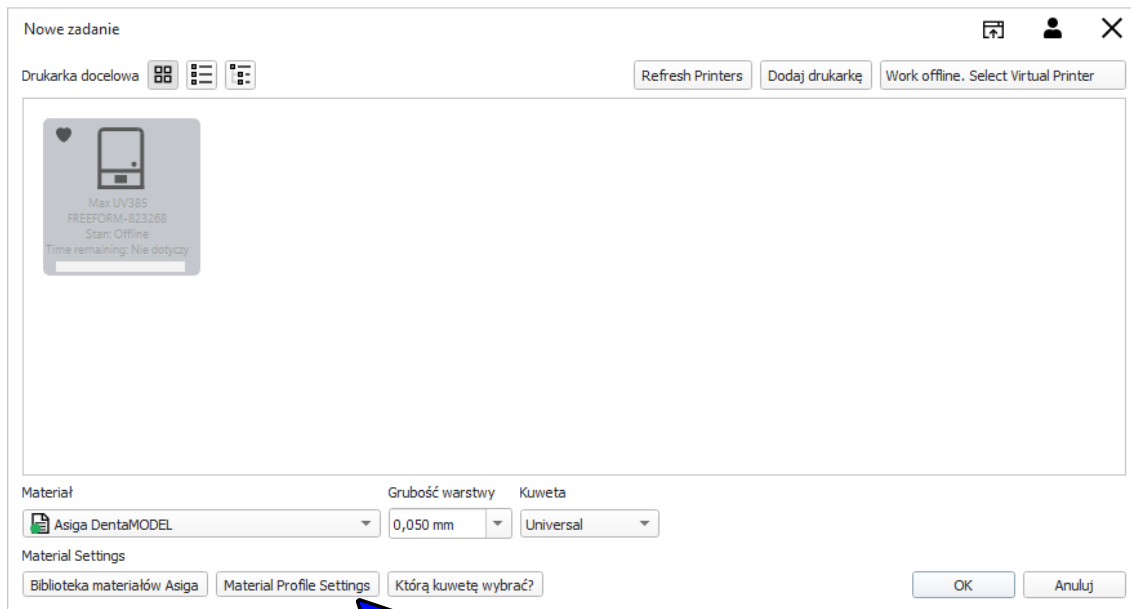

3. W oknie Material Profile Settings kliknij **Importuj Materiały**.

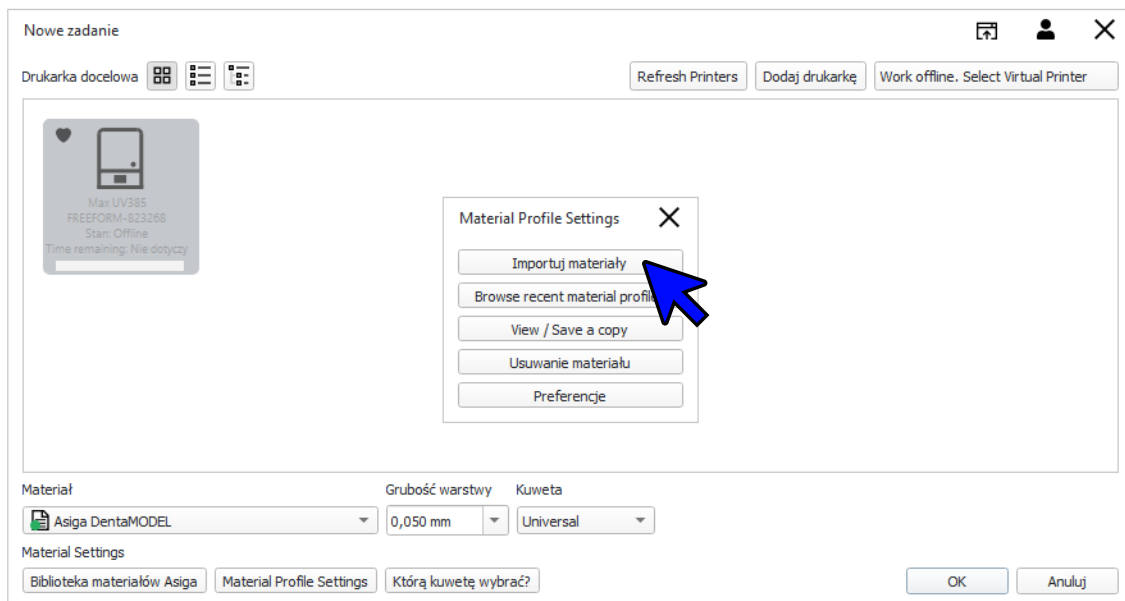


4. Wybierz **plik .ini** używanego materiału.

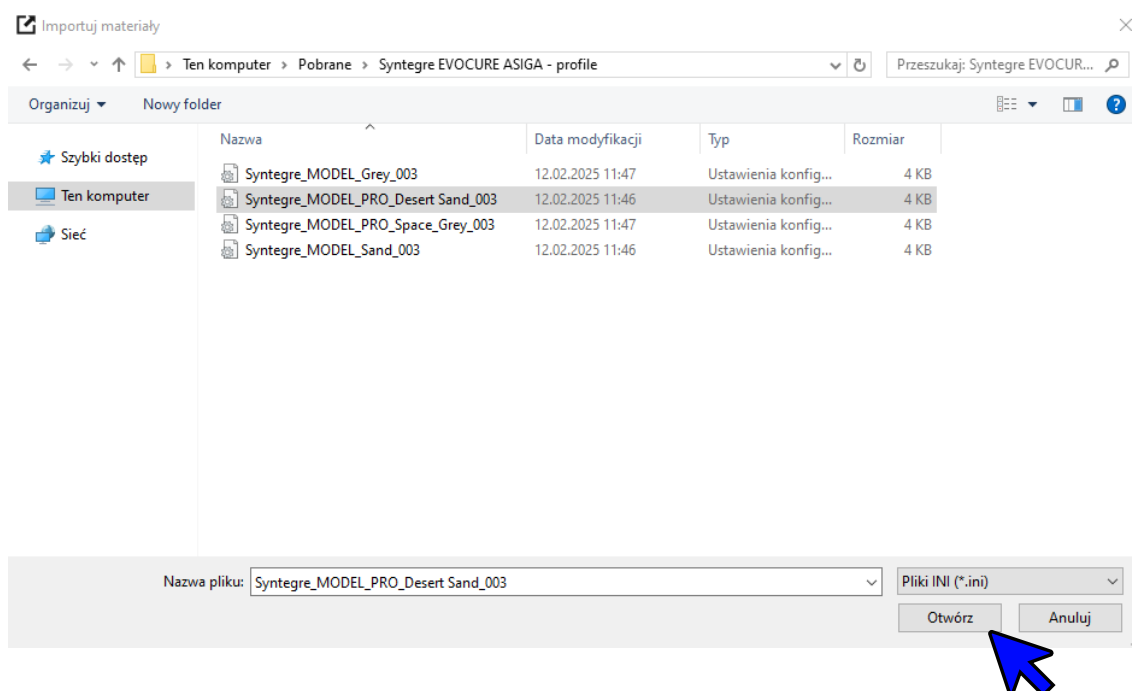


5. Zaakceptuj komunikat

Uwaga! Composer domyślnie wybrał nowo zaimportowany profil materiału do tego zadania.

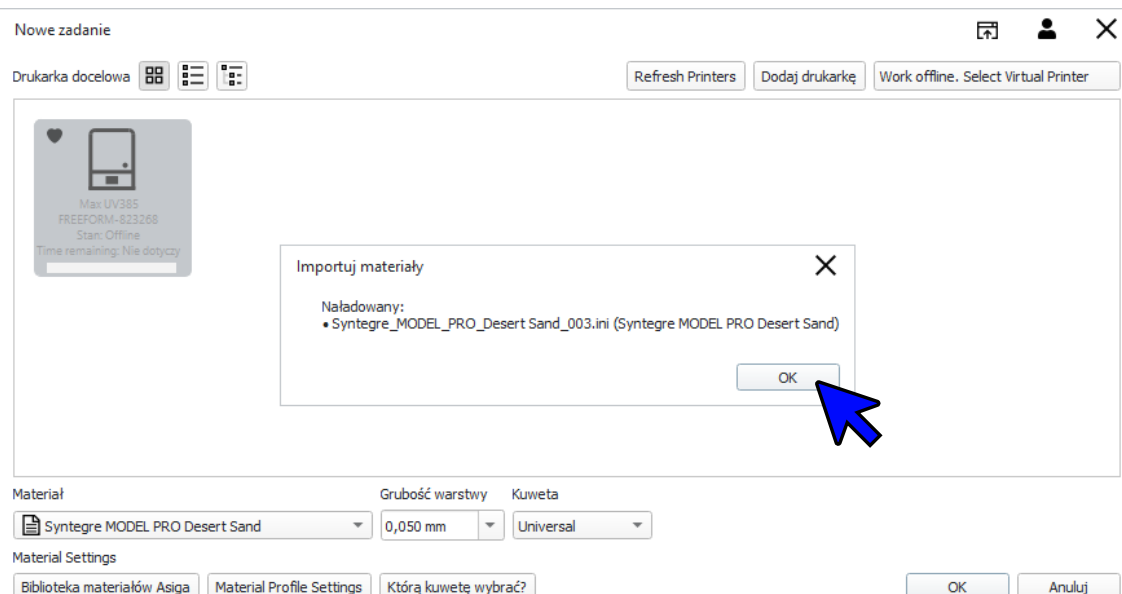

6. Utwórz nowe zadanie

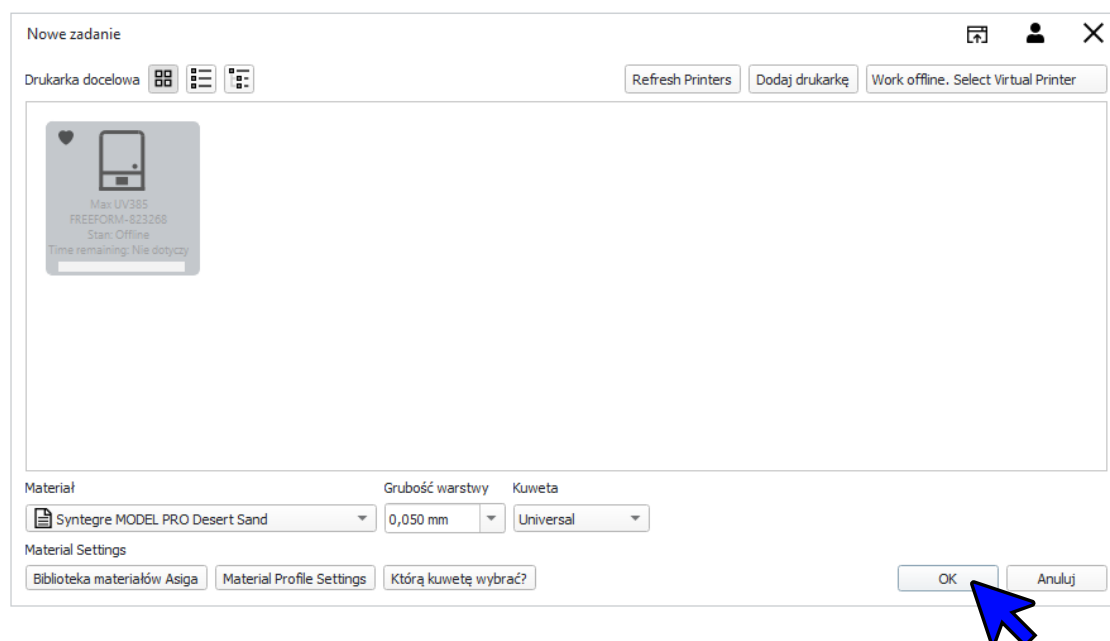

7. Gotowe!

Możesz teraz załadować modele i drukować na jednej z naszych żywic EVOCURE!

Gdybyś chciał/a zmienić materiał na inny, kliknij w ikonę po lewej stronie (w nowej wersji programu) albo na wstążce w lewym górnym rogu (w starej wersji).

Nowa wersja (2.1.1)



Stara wersja (2.0.X i wcześniejsze)

