

The background features a complex geometric design with overlapping blue and black shapes. A large, light blue triangle is positioned in the upper left. Below it, a large, dark blue curved shape sweeps across the middle. In the lower right, a large, dark blue circular shape is partially visible. The overall effect is a modern, abstract composition.

ISOCOAT

UV BLOCKER XL

Instrukcja użytkowania

syntegre®

ISOCOAT

UV BLOCKER XL

Instrukcja Użytkowania

OPIS PRODUKTU

ISOCOAT UV BLOCKER XL to uniwersalny, światłoutwardzalny żel odporny na wysoką temperaturę, stworzony do precyzyjnych prac laboratoryjnych w protetyce i ortodoncji, zarówno na modelach gipsowych jak i drukowanych 3D.

PRZED UŻYCIEM

- Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące użytkowania oraz środków ostrożności w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania tego produktu.
- Przed pierwszym użyciem pozwól ogrzać się żelowi do temperatury pokojowej.
- Nie wystawiaj strzykawki na działanie światła słonecznego oraz UV. Przechowuj produkt w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła i płomieni.
- Upewnij się, że powierzchnia jest prawidłowo wyczyszczona i utwardzona. Żel nakładaj kiedy jest sucha i odpylona.
- Nie stosować w jamie ustnej pacjenta

APLIKACJA

- Nanieś odpowiednią ilość żelu bezpośrednio ze strzykawki na blokowaną powierzchnię. Żel możesz rozprowadzić za pomocą dołączonego aplikatora, pędzelka lub dowolnego narzędzia.
- Zbierz nadmiary żelu. W przypadku naprawy modelu możesz dostosować kształt za pomocą frezu po polimeryzacji.
- Polimeryzuj żel w dowolnej lampie UV do czasu utwardzenia. Nadaje się do większości typów lamp: ręcznych stomatologicznych, polimeryzacji wydruków UV czy paznokci.
- Po całkowitym utwardzaniu zetrzyj powstałą warstwę inhibicyjną. Możesz to zrobić za pomocą ręcznika papierowego.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

- ISOCOAT UV BLOCKER XL może powodować podrażnienia. Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej.
- Informacje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa znajdują się na etykiecie produktu i karcie charakterystyki (SDS).

NUMER SERII/ DATA WAŻNOŚCI

- Termin przydatności produktu widoczny jest na opakowaniu każdej izolatora ISOCOAT.
- Podczas kontaktu z pomocą techniczną zawsze podawaj numer partii produktu.
- Nie używaj produktu po upływie terminu ważności.


SYMBOLE NA ETYKIECIE



Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi izolatora na stronie internetowej www.syntegre.com



Przechowuj w ciemnym suchym miejscu z dala od słońca i źródeł ciepła.

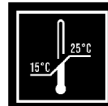

Izolator przechowuj w odpowiedniej temperaturze.

INFORMACJE KONTAKTOWE

W celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej produktu zapoznaj się z informacjami dostępnymi na stronie: www.syntegre.com lub napisz do nas na: support@syntegre.com



Syntegre s.c.
ul. Międzyrzecka 41/36
21-400 Łuków
www.syntegre.com info@syntegre.com

rev. 2024-04